

## 生物色试剂（七色）

**产品货号：**R32866

**产品规格：**50ml×7

**预期用途：**

主要用于组织切缘的标记识别。

**检验原理：**

采用不同颜色的色标剂，对组织切缘进行涂抹，满足组织标本切缘定向的需要。

**产品内容：**

| 产品组成      | 成分   | 规格   |
|-----------|------|------|
| 生物色试剂（黑色） | 黑色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（红色） | 红色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（黄色） | 黄色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（绿色） | 绿色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（橙色） | 橙色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（蓝色） | 蓝色色素 | 50ml |
| 生物色试剂（紫色） | 紫色色素 | 50ml |

**样本要求：**

标本类型：手术切除组织。

**检验方法：**

1. 手术切除新鲜组织，擦拭组织表面的液体后，用木签或竹签沾取不同颜色试剂后涂抹组织切缘。
2. 应用于脂肪组织时，可用喷壶喷洒少量丙酮对组织表面进行脱脂处理，擦拭干后再使用色标剂进行染色，如乳腺和皮下组织。
3. 涂抹染料后静置2~5分钟，自然晾干，无需吹干或烘干。
4. 染色后组织可用于福尔马林固定或冷冻切片。

**检验结果的解释：**

1. 使用多色试剂标记组合，可将同一病例多个染色后的组织包埋于一个蜡块中，将有效降低成本提高效率 and 便于镜下观察。
2. 试剂干涸后将不能使用。

**检测方法的局限性：**

1. 专业的操作人员、经过认证的实验室和标准化的实验流程，可以减少各种外界因素造成的操作偏差。
2. 本试剂仅用于对组织进行有色标记，不作其他用途。

**注意事项：**

1. 本染色液仅用于标记，不做其它用途。
2. 本试剂仅限专业人员使用。
3. 应用适当的防护措施，以避免试剂同皮肤和眼睛接触。
4. 超过有效期的试剂活性可能降低，因此不得使用过期的试剂盒。
5. 使用中所产生的各种废弃物都应按《医疗废物管理条例》处理。

**有效期：**室温避光，有效期24个月。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com